


# QUY TRÌNH TỰ LẤY MẪU XÉT NGHIỆM TEST NHANH KHÁNG NGUYÊN VI RÚT SARS-COV-2

## QUY TRÌNH XÉT NGHIỆM

### CÁC BƯỚC THỰC HIỆN XÉT NGHIỆM


#### Bước 1:

Chuẩn bị tuýp dung dịch đệm (buffer) theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

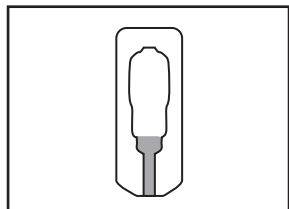


#### Bước 2:

Tiến hành tự lấy mẫu trước gương hoặc thực hiện thao tác lấy mẫu cho các thành viên khác trong hộ gia đình.

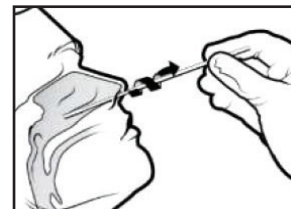


#### Bước 3:

Dùng tay xoay đều tăm bông trong tuýp nhựa chứa dung dịch đệm, nhúng que tăm bông lên xuống trong dung dịch đệm (10 lần).

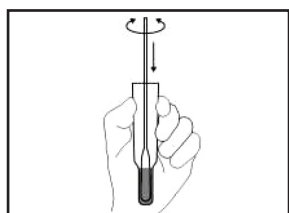


#### Bước 4:

Chuyển tay lên phần thân trên tuýp, bóp chặt và rút từ từ que tăm bông. Đảm bảo vắt sạch toàn bộ dung dịch còn đọng trên đầu tăm bông xuống đáy tuýp.

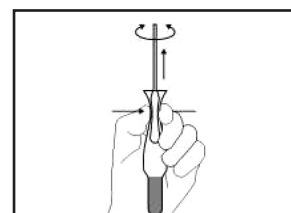


#### Bước 5:

Đóng chặt nắp màng lọc, lắc đều dung dịch trong tuýp bằng tay (5 lần)

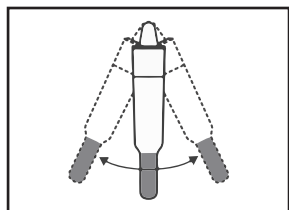

#### Bước 6:

Ghi tên mỗi thành viên lên từng khay test tương ứng. Nhỏ 03-05 giọt dung dịch trên vào giếng test (theo hướng dẫn của nhà sản xuất).

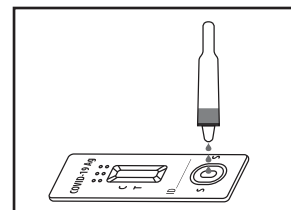


#### Bước 7:

Đọc KQ sau 15-30 phút theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

## PHÂN TÍCH KẾT QUẢ

1. Đọc kết quả theo hướng dẫn phân tích kết quả của nhà sản xuất.

2. Trường hợp âm tính (chỉ xuất hiện 1 vạch C): kết luận mẫu bệnh phẩm của người được lấy mẫu có kết quả **ÂM TÍNH** tại thời điểm xét nghiệm.

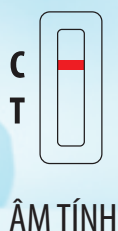

3. Trường hợp dương tính (xuất hiện cả 2 vạch C và T): kết luận mẫu bệnh phẩm của người được lấy mẫu có kết quả **DƯƠNG TÍNH** bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên tại thời điểm xét nghiệm.



4. Báo cáo kết quả và nộp lại khay test cho cán bộ y tế để tổng hợp.

*\*Lưu ý: Người dân tự thực hiện test nhanh dưới sự giám sát của nhân viên y tế.*